

PathAguard®

SOLUBLE BEDPAN LINER Vízben Oldódó Ágytál Betét

LATEX
FREENON
STERILELatex
mentesNem
steril

REF CMCBPL10001A: PATHAGUARD Soluble Bedpan Liner - Feloldható Ágytál Betét

A PathAguard Soluble Bedpan Liner egy rendkívül hatékony Széklet, valamint Vizelet Megtartó Rendszer. Ez egy innovatív megoldás az ágyhoz kötött betegek emberi testváladék kezelésének problémájára. Az egyedülálló PathAguard Soluble Bedpan Liner polivinil-alkohol víz által oldható anyagból készült, és teljesen feloldódik Ágytál Mosógépben.

Az egészségügyi kihívás

Az emberi test összes testváladéka potenciálisan fertőző. A vécék használata mérsékli a testváladék esetleges közvetlen környezetbe jutását, valamint a kórokozókkal való szennyeződés kockázatát. Ha azonban a beteg mozgása korlátozott vagy teljesen ágyhoz van kötve, akkor ezen egyszerű testfunkció is problémát jelenthet, mind a beteg, mind az egészségügyi dolgozó számára. A Norovírus, a Clostridium difficile-fertőzés, a Tífusz és most a COVID-19 egy osztályon vagy részlegesen történő kitörése pusztító hatásokkal járhat, megbetegedések, akár halálozások számának növekedésével különösen a veszélyeztetett betegeknél.

Hogyan működik

A PathAguard Soluble Bedpan Liner egy olyan termék, mely valamennyi testváladékot egy speciális betétben tárolja, valamint biztonságosan illeszkedik az ágytálhoz. A betétbe beépített speciális ragasztószalag biztosítja, hogy a termék használat közben is rögzített maradjon. Használat után azonnal megkötjük, csökkentve ezzel a kellemetlen szagokat, ezáltal megkímélve az osztályon fekvő betegeket a kellemetlenségektől. Az ágy melletti biztonságos elszigetelés azzal az előnnyel is jár, hogy csökkenti a környezetbe történő aeroszol és kellemetlen szagok jutását. A beteg ágyától a mosósobáig történő út veszélyes lehet ezen munkával megbízott dolgozók számára, mivel a véletlenül kilocsant tartalom megfertőzheti a dolgozót.

A PathAguard Soluble Bedpan Liner biztosítja, hogy az ágytál tartalma ne szennyezze se az egészségügyi dolgozókat, se a környezetet. A testváladék nem kerül közvetlen kapcsolatba az ágytállal és klinikai értékelés során a személyzet megjegyezte, az ágytálak tiszták maradtak, ezáltal növelve a betegek komfortérzetét. Az ágytálak mostantól folt-, valamint testváladéktól mentesek lehetnek, míg korábban összetapadtak, nehezítve ezzel fertőtlenítésüket. Ez befolyásolja az ágytálmosóban való fertőtlenítést. A tartalom teljes elzárása megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését, valamint tisztán tartja a környezetet és az ágytálakat.

Előnyök

- Csökkenti az aeroszolosodás kockázatát
- Megakadályozza a rossz szagok kialakulását
- Csökkenti a munkaterhelést, valamint a betegek stresszhelyzetét
- Magas elégedettségi fokozat

Jellemzők

- CE Jelölés
- Latexmentes, egyszer használatos betét
- A Soluble Bedpan Liner teljesen feloldódik 70°C feletti fertőtlenítő mosásnál



PathAguard®

SOLUBLE BEDPAN LINER Vízben Oldódó Ágytál Betét

LATEX
FREENON
STERILELatex
mentesNem
steril

A PathAguard Soluble Bedpan Liner egy rendkívül hatékony Széklet, valamint Vizelet Megtartó Rendszer.

Távolítsa el a
Soluble Bedpan
Liner-t a
csomagolásból

1



A Soluble Bedpan Liner alsó részéről
távolítsa el a szalagot.



Ragassza hozzá az ágytál
belső részéhez



4

Hajtsa ki az ágytál
széleihez.



Használatot követően a tartalom rögzítéséhez
kösse össze a betét felső részét a szalag
segítségével.

Helyezze az ágytálat a
fertőtlenítő
mosóberendezésben, az
oldható ágytál-béllel
együtt.

**⚠ NE TÁVOLÍTSA
EL AZ OLDHATÓ
ALÁTÉTET AZ
ÁGYTÁLTÓL.**

6

A Soluble Bedpan Liner teljesen
feloldódik a mosási ciklus alatt.

Bármely súlyos baleset, mely ezzel az Eszközzel kapcsolatban történt, jelenteni kell a gyártónak, forgalmazónak.



**A FENT EMLÍTETT TERMÉKET CSAK ERRE KÉPZETT SZEMÉLY HASZNÁLHATJA.
70°C/158°F FELETTI HŐMÉRSÉKLETEN KEZD FELOLDÓDNI.
HA A TERMÉK TÖRÖTT VAGY SÉRÜLT NE HASZNÁLJA.**